

**Время  
для себя!**



**Массажер  
для шеи  
КТ-2951**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**info@kitfort.ru**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	6
Устройство массажера для шеи .....	6
Подготовка к работе и использование.....	8
Чистка и обслуживание .....	14
Уход и хранение .....	15
Устранение неполадок .....	16
Технические характеристики.....	19
Меры предосторожности.....	21
Другие товары Kitfort .....	25

## Общие сведения

Массажер для шеи КТ-2951 выполняет массаж шеи электрическими импульсами, воздействуя на нервы и мышцы. Микротоковая стимуляция и воздействие теплом стимулируют мышцы шеи и повышают тонус, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови. Благодаря нагреву электродов эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Расслабление мышц шеи и улучшение кровотока также помогают избавиться от головных болей и проблем со сном. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто подолгу работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи.

Благодаря подвижной конструкции электроды массажера плотно прилегают к изгибам шеи и подходят людям с разным размером шеи.

У массажера 6 режимов работы: смешанный режим, восстановительный, классический, расслабляющий, акупунктурный и перкуссионный массаж. В каждом режиме вы можете настроить интенсивность воздействия от слабой (1) до сильной (15). При переключении режимов интенсивность не меняется. В каждом режиме вы можете отключить или включить нагрев и выбрать один из двух уровней нагрева. Также можно

включить только нагрев без электрических импульсов. Благодаря большому количеству настроек вы точно подберете массаж, который подходит вам лучше всего.

Массажер оснащен голосовым сопровождением — при нажатии на регулятор, кнопку «Нагрев» или вращении регулятора, низком уровне заряда аккумулятора и при отключении массажер подает звуковые команды, сообщая о выбранном режиме, установленной интенсивности воздействия и уровне нагрева.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более двух сеансов в день.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-2951 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи в области шеи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Массажер очень компактный, легкий и работает от аккумулятора, что позволяет брать его с собой на работу, в поездки или путешествия.

Если массажер включен, но не надет на шею, электрические импульсы подаваться не будут, и примерно через 1 минуту массажер отключится. Если включе-


на только функция нагрева, то электроды будут нагреваться, массажер отключится через 15 минут. Также если включить массажер, но дотронуться только до одного электрода, то электрические импульсы не будут подаваться.


## Комплектация

1. Массажер — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство массажера для шеи

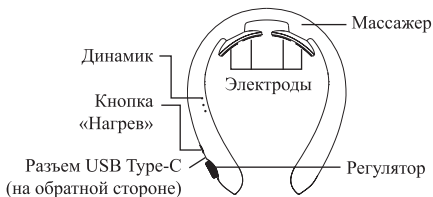

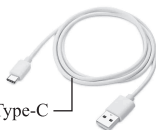

Шнур USB Type-C

**Регулятор** включает и отключает массажер, циклически переключает 6 режимов работы:

- смешанный режим сочетает в себе все 5 видов — восстановительный, классический, расслабляющий, акупунктурный и перкуссионный массаж, переключающиеся поочередно;
- восстановительный массаж вызывает прилив крови к зоне массажа, улучшает кровообращение и помогает в борьбе с бессонницей и головной болью;
- классический массаж по ощущениям напоминает мануальный массаж с разминанием мышц шеи;
- расслабляющий массаж снимает напряжение после долгой работы в сидячем положении или неудобной позы во время сна;
- акупунктурный массаж воздействует на активные точки шеи;
- перкуссионный массаж по ощущениям напоминает массаж постукиванием, расслабляет мышцы после тренировок.

Вращением регулятора настраивают интенсивность воздействия от слабой (1) до максимальной (15).



**Кнопка «Нагрев»** включает, переключает 2 уровня нагрева и отключает нагрев.

Голосовые команды сообщают, какой режим, интенсивность воздействия и уровень нагрева установлены, а также о необходимости зарядить массажер и об окончании массажа.

На корпусе массажера, рядом с кнопкой «Нагрев», расположен индикатор заряда. **Индикатор заряда** во время зарядки мигает. Когда массажер полностью зарядится, индикатор заряда начнет гореть непрерывно. Во время работы массажера индикатор заряда горит непрерывно, если уровень заряда достаточный, или мигает, если массажер необходимо зарядить.

## **Подготовка к работе и использование**

### **Подготовка к работе**

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер влажной мягкой тканью и зарядите, как это описано в главе «Зарядка массажера».

### **Зарядка массажера**

Если при работе массажера индикатор заряда мигает и подается голосовая команда «Низкий уровень заряда, зарядите массажер», у аккумулятора низкий



заряд. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. Если при включении устройство не работает, значит, аккумулятор разрядился полностью.

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор заряда плавно мигает. При полном заряде индикатор горит непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2–2,5 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки массажер не включать.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряжен-



ным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, затем заряжайте в течение 1 часа.

### **Использование**

1. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа шеи и электроды чистые. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. Необходимо, чтобы на шее ничего не было: одежда не должна закрывать шею, шейные украшения нужно снять.
2. Наденьте массажер на шею так, чтобы динамик был направлен вверх, а разъем USB Type-C — вниз.
3. Займите удобное положение сидя или лежа, шея не должна быть напряжена. Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте регулятор. Массажер включится, прозвучит звуковая команда: «Массажер включен. Смешанный режим». Затем автоматически включится слабая интенсивность воздействия (1).

**Примечание.** Если при этом массажер не надет на шею, он отключится примерно через 1 минуту.

4. При включении массажера будет выбран режим «Смешанный». Голосовые команды сообщают, какой режим включен. Для переключения режимов нажимайте на регулятор.
5. При отсутствии каких-либо ощущений или слишком слабых ощущениях увеличьте интенсив-

ность воздействия, повернув регулятор по часовой стрелке. Если во время массажа вы хотите изменить интенсивность, поверните регулятор в соответствующую сторону: для увеличения интенсивности — по часовой стрелке, для уменьшения интенсивности — против часовой стрелки. Если установлена интенсивность 1, при повороте регулятора против часовой стрелки подача электрических импульсов отключится, прозвучит голосовая команда: «Массаж отключен». Максимальная интенсивность воздействия — 15.

**Внимание!** Не касайтесь руками всех электродов одновременно, когда массажер включен!

6. Чтобы включить нагрев и настроить его уровень, нажимайте на кнопку «Нагрев». Также во время массажа вы можете отключить нагрев, для этого нажмите на кнопку «Нагрев» один или более раз, чтобы прозвучала команда: «Нагрев отключен».
7. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут массажер подаст голосовую команду: «Массаж окончен» — и автоматически отключается, даже если вы меняли режим, интенсивность воздействия или уровень нагрева. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите и удерживайте регулятор.

**Примечание.** Перед повторным включением массажера подождите около 15–30 минут, чтобы из-

бежать перегревания устройства. Не рекомендуется проводить более одного сеанса массажа подряд или более двух сеансов в день.

8. Снимите массажер с шеи. Протрите электроды и массажер мягкой тканью.

### **Советы**

На электроды приклейте специальные гелиевые подушечки (в комплект не входят, продаются во многих интернет-магазинах). Вместо гелиевых подушечек можно использовать токопроводящий контактный гель или просто увлажнить электроды и кожу шеи водой. Это обеспечит лучшую проводимость электрических импульсов.

Чувствительность к электрическим импульсам может различаться: некоторым третья интенсивность кажется достаточной, а другие начинают ощущать воздействие только на десятой интенсивности. Рекомендуется начинать массаж на минимальной интенсивности и увеличивать ее, ориентируясь на свои ощущения. На высокой интенсивности воздействия возможно покраснение кожи в местах соприкосновения с электродами.

Всегда проверяйте, чтобы электроды плотно прилегали к коже, при неплотном прилегании возможно ощущение жжения, покалывания и покраснение кожи.

В таком случае прекратите массаж, перед новым сеансом массажа дождитесь, чтобы следы на коже прошли.

Если вы чувствуете дискомфорт на любой интенсивности воздействия, немедленно прекратите массаж и обратитесь к врачу.

Длительность сеанса массажа не должна превышать 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается, даже если вы меняли режим, интенсивность воздействия или уровень нагрева. Не проводите более одного сеанса массажа подряд и более 2 сеансов в день.

Если вы хотите включить массажер еще раз, например, для проведения сеанса массажа другому человеку, то подождите около 15–30 минут, чтобы избежать перегрева устройства.

Перед проведением массажа разным лицам очистите электроды и корпус массажера. Для очистки вы можете использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином, или антибактериальные влажные салфетки.

### **Меры предосторожности по применению**

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
  - инфекционные заболевания кожи;
  - остеопороз;
  - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
  - повышенная температура;
  - сахарный диабет.
4. Пользоваться с осторожностью при:
  - беременности;
  - наличии ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
  - нечувствительности к теплу;
  - переутомлении.
5. Данный массажер нельзя использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла, детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Не используйте массажер на животных.

## **Чистка и обслуживание**

Протрите массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки электродов допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, смоченные в мыльном

растворе. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкости внутрь массажера или динамика, на шнур и разъем для зарядки.

## Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1 час. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

**Устройство не включается, индикатор заряда не горит, голосовые команды не подаются**

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите массажер в соответствии с главой «Зарядка массажера»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора

**Массажер не работает, звуковые команды подаются**

Возможная причина	Решение
Электроды неплотно прилегают к коже	Перед выполнением массажа убедитесь в отсутствии чего-либо на шее, наденьте одежду без воротников или «высокого горла», уберите волосы и снимите нашейные украшения



### Массажер для шеи КТ-2951

Возможная причина	Решение
Массаж отключен	Чтобы массажер начал работать, необходимо установить интенсивность 1–15
Низкая интенсивность	Разная чувствительность кожи — индивидуальная особенность, если на низком уровне интенсивности вы ничего не ощущаете, установите более высокую интенсивность

### Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк

Возможная причина	Решение
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А

### Покраснение на коже

Возможная причина	Решение
Слишком высокая интенсивность воздействия	Это не является неисправностью массажера. Чувствительная кожа может покраснеть или получить легкий ожог в месте прилегания электродов, если установлена высокая интенсивность. Дождитесь, когда покраснение пройдет, в будущем используйте массажер на низкой или средней интенсивности
Электроды неплотно прилегают к коже	Перед включением массажера убедитесь, что электроды плотно прилегают к коже шеи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C  $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,9 А\*ч (3,33 Вт\*ч)
5. Время зарядки: 2–2,5 часа
6. Время работы: 3–3,5 часа
7. Размер электродов: 17 × 30 мм
8. Длина шнура USB Type-C: 1 м
9. Размер устройства: 130 × 165 × 30 мм
10. Размер упаковки: 169 × 183 × 42 мм
11. Вес нетто: 0,10 кг
12. Вес брутто: 0,23 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: **EAC**

Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко.,  
Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Бинь-  
лан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-  
Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия пре-  
тензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд».  
197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д.  
3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87  
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@  
kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у  
оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нане-  
сения вреда окружающей среде необходимо отделить  
данный объект от обычных отходов и утилизировать  
его наиболее безопасным способом, например, сдать в  
специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней сто-  
роне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение измене-  
ний в дизайн, комплектацию, а также в технические

характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса или электродов устройства, на разъем шнура питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и электродов вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах,

офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а

также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не касайтесь электродов руками, когда массажер включен. Следите, чтобы дети не могли случайно дотронуться до электродов, когда массажер включен.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей

может привести к поломке устройства или получению травм.

15. При полной или частичной потере чувствительности в зоне шеи не рекомендуется пользоваться прибором.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса и электродов устройства, в область разъема шнура и органы управления.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Перед подсоединением или отсоединением устройства от источника питания, отключайте его.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1



## Другие товары Kitfort

### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



### Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина





### **Ручной отпариватель КТ-962**

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

### **Кофеварка КТ-739**

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



### **Планетарный миксер КТ-3007**

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87