


Волшебное искусство отдыхать!

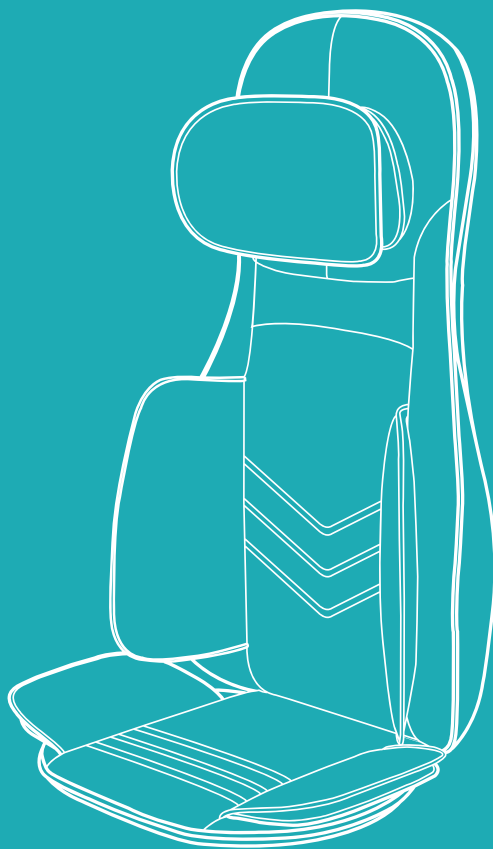

**Массажер
КТ-2934**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство массажера	5
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	10
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	12
Другие товары Kitfort	14

Общие сведения

Массажер КТ-2934 поможет снять усталость и расслабить мышцы спины и шеи с помощью роликового (массаж Шиаци) или воздушно-компрессионного массажа, также можно совместить оба вида массажа. Вы можете выбрать зону роликового массажа и скорость вращения массажных роликов зоны спины, включить вибрацию или нагрев.

Массажер подойдет как людям, ведущим сидячий образ жизни, так и тем, кто испытывает физические нагрузки, например спортсменам после тренировки. Массаж поможет избавиться от дискомфорта в спине и шее водителям, так как устройством можно пользоваться в автомобиле во время остановок, подключив массажер к автомобилю через прикуриватель. Также длины шнура автомобильного адаптера хватит, чтобы использовать массажер на заднем сидении автомобиля.

Массажные ролики воздействуют на мышцы, усиливая циркуляцию крови, в результате чего ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Сеансы массажа положительно влияют на состояние костно-мышечной системы и повышают эластичность мышечных волокон. Массаж помогает восстановить нормальную работу лимфотока, что оказывает общее детоксикационное действие и улучшает доступ питательных веществ к межпозвоночным дискам.

Встроенные воздушные подушки на спинке и сидении массажера позволяют провести воздушно-компрессионный массаж. Этот вид массажа является щадящим и мягким, применять его можно каждый день. Сеанс воздушно-компрессионного массажа может быть как самостоятельным видом расслабляющих процедур, так и предварительным или завершающим этапом роликового массажа. Предусмотрено 3 автоматических режима воздушно-компрессионного массажа.

Массажер имеет 4 зоны роликового массажа: вся спина, плечевой пояс, поясница и шея. Есть возможность проработать определенную зону спины, остановив перемещение роликов в выбранной точке. Во время проведения роликового массажа спины вы можете выбрать одну из трех скоростей вращения массажных роликов для комфортного использования массажера.

Настройте индивидуальный режим роликового массажа или выберите один из трех автоматических режимов: общий массаж спины, массаж спины с акцентом на проработку зоны поясницы, массаж спины с акцентом на проработку плечевого пояса.

Для повышения эффективности массажа КТ-2934 обладает функциями вибрации и нагрева. Нагрев улучшает микроциркуляцию крови, а три уровня вибрации способствуют лучшему расслаблению мышц.

Управление массажером осуществляется с пульта управления, который можно убрать в карман для хранения на массажере. У данной модели массажера есть удобное крепление резинками к спинке стула. После 15-минутного сеанса массажа сработает автоотключение.

Данное устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях. Если у вас есть какие-то заболевания или противопока-


занима к проведению массажа спины, то перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

Комплектация


1. Массажер — 1 шт.
2. Блок питания со шнуром — 1 шт.
3. Автомобильный адаптер (в прикуриватель) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

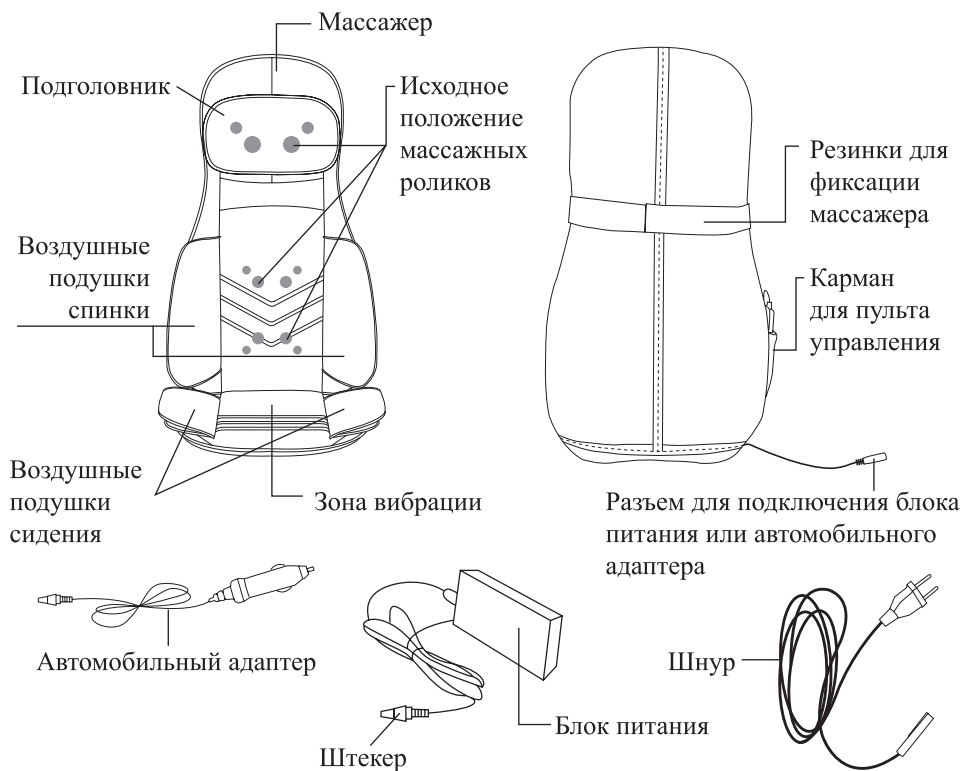

Пульт управления

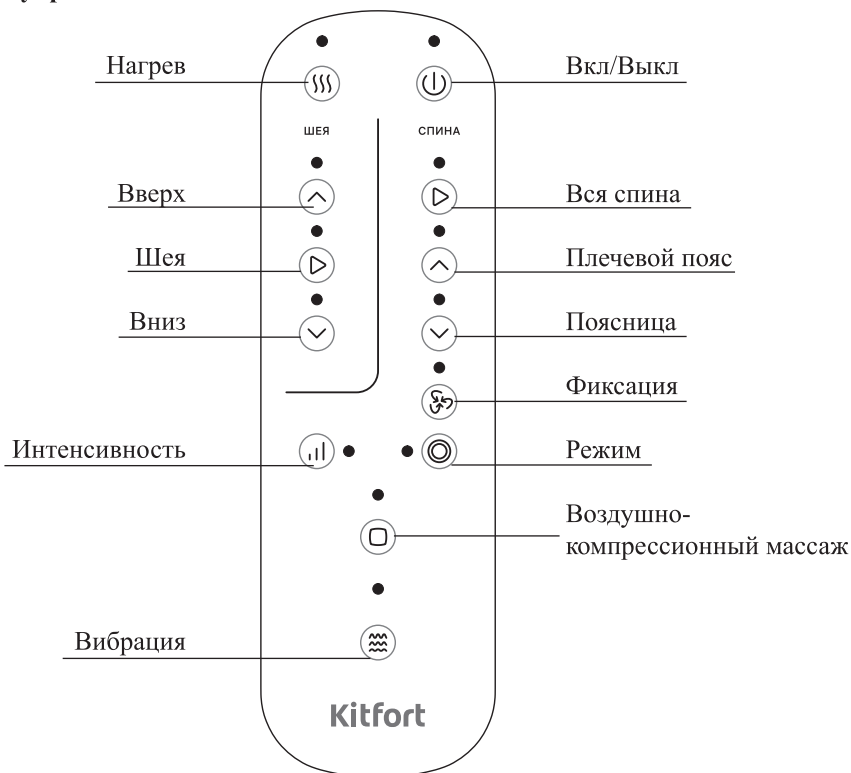

Управление массажером осуществляется кнопками на пульте управления. Рядом с каждой кнопкой расположен индикатор, который загорается при нажатии на кнопку.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер.

Кнопка «Шея» включает, выбирает направление вращения массажных роликов и выключает роликовый массаж зоны шеи. После нажатия на кнопку «Шея» индикатор над кнопкой будет гореть непрерывно — ролики будут вращаться по часовой стрелке, при повторном нажатии на кнопку индикатор начнет мигать — ролики будут вращаться против часовой стрелки. Ролики для массажа шейной зоны находятся в подголовнике, который можно поднять или опустить кнопками «**Вверх**» и «**Вниз**».

Нажатие на **кнопку «Вся спина»** включает роликовый массаж спины. Для проведения массажа спины от плеч до середины спины нажмите на **кнопку «Плечевой пояс»**. Чтобы проработать область ниже середины спины, нажмите на **кнопку «Поясница»**.

Нажатие на **кнопку «Фиксация»** останавливает перемещение массажных роликов зоны спины в текущем положении для проработки выбранной области.

Кнопкой «Интенсивность» регулируется скорость вращения массажных роликов, расположенных в зоне спины: низкая (индикатор мигает медленно), средняя (индикатор мигает быстро) и высокая (индикатор горит непрерывно). При включении роликового массажа спины и во время массажа фиксированной зоны спины по умолчанию выбрана средняя скорость. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующую скорость вращения массажных роликов. Переключение происходит циклически, т.е. нажатие на эту кнопку после выбора высокой скорости переключит массажер на низкую скорость вращения массажных роликов.

Кнопкой «Режим» осуществляется включение и выбор одного из трех автоматических режимов работы массажера. Однократное нажатие на кнопку переключит массажер на следующий режим:

- первое нажатие — общий роликовый массаж спины. Индикатор над кнопкой «Режим» медленно мигает;
- второе нажатие — роликовый массаж спины с акцентом на проработку зоны поясницы. Индикатор над кнопкой «Режим» быстро мигает;
- третье нажатие — роликовый массаж спины с акцентом на проработку плечевого пояса. Индикатор над кнопкой «Режим» горит постоянно.

Для включения, выбора режима и выключения воздушно-компрессионного массажа нажмите на **кнопку «Воздушно-компрессионный массаж»**:

- первое нажатие — надуется левая воздушная подушка спинки и правая воздушная подушка сидения. Индикатор над кнопкой «Воздушно-компрессионный массаж» медленно мигает;
- второе нажатие — надуется правая воздушная подушка спинки и левая воздушная подушка сидения. Индикатор над кнопкой «Воздушно-компрессионный массаж» быстро мигает;
- третье нажатие — надуваются все воздушные подушки. Индикатор над кнопкой «Воздушно-компрессионный массаж» горит постоянно;
- четвертое нажатие — выключение воздушно-компрессионного массажа. Индикатор над кнопкой «Воздушно-компрессионный массаж» погаснет.

Для включения, выбора уровня вибрации и выключения функции вибрации нажмите на **кнопку «Вибрация»**. При первом нажатии включится низкий уровень вибрации. Второе нажатие включит средний уровень вибрации, а третье — максимальный уровень вибрации. Четвертое нажатие на кнопку «Вибрация» отключает функцию вибрации.

Для включения и выключения функции нагрева спины и шеи нажмите на **кнопку «Нагрев»**. При нажатии на кнопку над ней загорится индикатор — функция включена. При повторном нажатии на кнопку индикатор погаснет — функция выключена. Температура нагрева составляет 50–55 °С.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

1. Достаньте массажер из коробки и удалите все упаковочные материалы.
2. Поместите массажер на стул. Зафиксируйте массажер на спинке стула резинками.
3. Вставьте штекер блока питания в разъем на массажере, а к блоку питания подключите шнур. Шнур подключите к сети электропитания. Вы можете использовать массажер в автомобиле, подключив массажер к прикуривателю через автомобильный адаптер (входит в комплект). Вставьте один конец автомобильного адаптера в разъем на массажере, а другой подсоедините к автомобилю через прикуриватель. На автомобильном адаптере загорится лампочка — массажер готов к работе.

Внимание! Не используйте массажер во время езды во избежание аварийных ситуаций на дороге. Если в дороге вы устали, припаркуйтесь и тогда используйте массажер.

Использование

1. Сядьте на массажер ровно. Расслабьтесь, не давите на массажер. Проводите сеанс массажа в одежде без каких-либо декоративных элементов (ремней, пуговиц, молний и т. п.). Наличие аксессуаров на одежде может нанести вам повреждения во время массажа.
2. Для включения массажера нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Над кнопкой загорится индикатор.
3. Нажмите на кнопку «Шея», чтобы включить роликовый массаж шеи. Кнопками «Вверх» и «Вниз» настройте удобное положение подголовника.
4. Нажмите на кнопку «Режим», чтобы выбрать один из трех автоматических режимов роликового массажа спины: общий массаж, массаж с проработкой поясницы, массаж с проработкой плечевого пояса.
5. Вы можете использовать не автоматический режим роликового массажа спины, а самостоятельно выбрать зону массажа спины. Для этого нажмите на кнопку «Вся спина», чтобы включить роликовый массаж спины. Измените зону роликового массажа спины кнопками «Плечевой пояс» или «Поясница». Над кнопкой, соответствующей выбранной зоне, загорится индикатор.
6. Если вы хотите проработать определенную зону спины, нажмите на кнопку «Фиксация», когда ролики будут массировать необходимую вам область. Ролики остановятся и будут крутиться только в фиксированной зоне.
7. Выберите необходимую скорость вращения массажных роликов, нажав на кнопку «Интенсивность».
8. Нажмите на кнопку «Воздушно-компрессионный массаж», чтобы включить один из трех режимов воздушно-компрессионного массажа.

Примечание. Роликовый массаж спины, шеи и воздушно-компрессионный массаж могут работать как вместе, так и по отдельности.

9. Нажмите на кнопку «Вибрация», чтобы включить и настроить уровень вибрации.
 10. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы включить функцию нагрева.
 11. Через 15 мин работает автоотключение. Чтобы выключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». При завершении работы над кнопкой «Вкл/Выкл» будет мигать индикатор, ролики вернуться в исходное положение, после чего индикатор погаснет — массажер выключен.
 12. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
- Примечание.** Рекомендуется проводить массаж не более 15 минут.
13. После завершения работы массажера отключите его от источника питания.

Примечание. Не отключайте массажер от сети питания, пока массажные ролики не вернулись в исходное положение и индикатор включения не перестал гореть.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - злокачественные новообразования;
 - повреждения целостности кожи в зоне массажа;
 - инфекционные заболевания кожи;
 - остеопороз;
 - переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
 - повышенная температура;
 - сахарный диабет;
 - беременность;
4. Детям младше 12 лет запрещается пользоваться устройством.

Чистка и обслуживание

Необходимо поддерживать чистоту изделия, т. к. стирка массажера запрещена.

Перед чисткой убедитесь, что массажер отключен от сети электропитания. Допускается протирать массажер влажной мягкой тканью. Не используйте массажер, если он влажный. Не сушите массажер на солнце. Не используйте агрессивные моющие средства.

Уход и хранение

Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как указано в главе «Чистка и обслуживание массажера». На длительное хранение уберите устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Не кладите тяжелые предметы на устройство во время хранения. Не перегибайте шнуры блока питания, пульта управления, автомобильного адаптера, не обматывайте их вокруг массажера.

Устранение неполадок

Массажер не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
В автомобильном адаптере перегорел предохранитель	Замените предохранитель (характеристики предохранителя: номинальный ток 10 А, длина 30 мм)
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления
Штекер блока питания вставлен не до конца или не вставлен в разъем на массажере	Плотно вставьте штекер блока питания в разъем на массажере
Штекер шнура вставлен не до конца или не вставлен в разъем на блоке питания	Плотно вставьте штекер шнура в разъем на блоке питания
Автомобильный адаптер вставлен не до конца или не вставлен в прикуриватель	Плотно вставьте автомобильный адаптер в прикуриватель машины
Штекер автомобильного адаптера вставлен не до конца или не вставлен в разъем на массажере	Вставьте штекер адаптера в разъем массажера
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть 30 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: $\sim 100\text{--}240$ В, 50/60 Гц, 1,2 А
 - выход: ≈ 12 В, 5 А
- Входное напряжение массажера: ≈ 12 В, 7 А
- Мощность: 60 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера и автомобильного адаптера: III
- Размер пульта: 50×150 мм
- Длина шнура пульта управления: 0,8 м
- Длина шнура блока питания: 1,8 + 1,5 м
- Длина шнура автомобильного адаптера: 3,0 м
- Размер устройства: $500 \times 480 \times 800$ мм
- Размер упаковки: $855 \times 260 \times 500$ мм
- Вес нетто: 6,8 кг
- Вес брутто: 8,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.



Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания жидкостей в массажер, на пульт управления, в блок питания со шнуром или автомобильный адаптер не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке или электросети автомобиля убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания или автомобильного адаптера. Не тяните за шнур при отключении от электросети.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в область разъема шнура и органы управления.
14. При повреждении блока питания со шнуром или автомобильного адаптера его следует заменить специальным блоком питания/адаптером или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радуется подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87